

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 110428

配 布 先		納 入 先	新鋭工業（株） 東京支店 殿			機 種	ONW-10
客先	1	所 在 地	東京都豊島区巢鴨 4-30-12			機 番	001427
環営	1						
環品	1						
		ユーザ名	吉田クリニック 様			納 入 日	平成19年 9月19日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	平成22年10月27日
		返 送 先	納入先と同じ			発 送 日	平成23年 4月27日
計	3						

修理依頼・異常内容

エラー4（水位レベルセンサ異常）発生。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水バルブが故障して洗浄槽に水が溜まらない状態になり、これを水位センサ（LVL）が検知してエラー4を発報しました。



[2] 修理・点検内容

- 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.77～0.65mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：91.5% 酸素流量：0.73L/min 圧力：0.113～0.203MPa
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

承認				
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
作成		排水バルブ	1式	駆動抵抗、チューブ含む
H23.4.28 中澤				