

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-44170

No. 140306

納入先	新鋭工業（株）東京支店 殿		機種	ONW-10
所在地	千葉県市原市泉台3-19-1		機番	001509
ユーザー名	泉台クリニック 様		納入日	平成19年12月13日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成25年12月16日
返送先	納入先と同じ		発送日	平成26年3月3日

修理依頼・異常内容

水槽の底から水漏れ

※新鋭工業殿が現地で水槽底部が割れた状態を確認しました。

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水漏れにつきまして

洗浄槽底部の亀裂を確認しました。何らかの衝撃が加わって底部が割れたと推測します。
亀裂部分を接着し、その上を溶接して補修しました。（写真をご参照ください）

写真1：洗浄槽底部（矢印の部分）

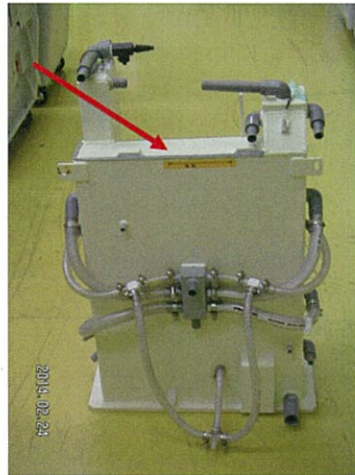


写真2：溶接後



[2] 修理・点検内容

- 部品交換及び水槽補修（下表と写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.57～0.64 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.9% 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.086～0.157 MPa（AC100V 50Hz）
- 運転確認 異常なし。オゾンインジケータ変色 異常なし。
- 運転回数：4083

一以上一

交換部品

部品コード	部品名称	数量	備考
	排水シリコンチューブ	1本	水槽修理作業に含む
	排水ポンプ入口チューブ	1本	水槽修理作業に含む

承認

安
26.3-6
田

審査

中
26.3-6
澤

作成

H26.3.6

中澤