

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100691
作業年月日	平成 26 年 1 月 16 日		作業時間: Hr
顧客名	つつじヶ丘診療所		TEL: 042-545-4737
所在地	東京都昭島市つつじヶ丘3-5-6-119		担当 様
販売店	ニスコ株式会社		担当 永原 様
納入年月日	平成 25 年 3 月 13 日	保証期間 内 ☒ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シート記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

12/21 オゾンセンサー故障 (E:100) 排水ポンプ故障 (E:103) エアライン圧力異常 (104) トレンド-タミヤ (51800) の運送のため、バグによる異常と判断し Ver 0/05 → Ver 0/07

不具合原因、作業内容

プログラムバージョンアップ 実施、定期点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バグ数 740
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 / ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

12/21 に バグが起きているため Ver 0/07 へ対策済 エアポンプも対策済み、
運転動作に異常なし 12.3.18 実施 12.6.1

装置 情報	交換後運転回数: 53	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 42	殺菌+7L: 18
	リークチェック: 0	自己洗浄: 4	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26 年 1 月 16 日

ご署名

宇田

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	山本