

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100482
作業年月日	平成 25 年 12 月 25 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	砂長胃腸科外科医院		TEL: 027-373-2263
所在地	群馬県高崎市稲荷台町1305-1		担当 石井 様
販売店	株式会社 IDK		担当 有馬 様
納入年月日	平成 24 年 5 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

オゾンリーク発生 (1:204) : 3/22, 3/30 x 2 → 3/14

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 599
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.93 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 77 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

77 の 3 元 同 1 汚水 が 付 く ため 装置 外 部 の タバネル 等 1 行 入 れ 有 っ た 満 ち。 9.10 ヲ タ 7. 15.13 ナ ヲ 7. 次 日 は 10 月 仕 込 カ ヲ 行 う 事。 Ver. 1.07 で し た。

装置情報	交換後運転回数: 1531	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 3/45	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 34	アルコール単独: 0	エア単独: 10

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

25 年 12 月 25 日

ご署名 石井 純子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

