

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

|       |                                                                                 |                                                                       |                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                             |                                                                       | 製造番号: 100403                                  |
| 作業年月日 | 平成 26 年 1 月 21 日                                                                |                                                                       | 作業時間: 1.2 Hr                                  |
| 顧客名   | 田谷医院                                                                            |                                                                       | TEL: 029-823-2636                             |
| 所在地   | 茨城県土浦市生田町3-27                                                                   |                                                                       | 担当 様                                          |
| 販売店   | ゲイトサイドジャパン                                                                      |                                                                       | 担当 門脇 様                                       |
| 納入年月日 | 平成 24 年 2 月 15 日                                                                | 保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input checked="" type="checkbox"/> 2 年 2 回目 |                                                                       | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                     |                                                                       | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合はありませんでした。

不具合原因、作業内容

OED-1000総合保守点検作業実施

点検項目

|          |                                                                    |           |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 495    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.93 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置内部運転動作に異常はありませんでした。

Ver 1/07 済

自己洗浄は殺菌剤を外して実施して下さい。

|          |               |                                                      |             |           |
|----------|---------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 1841 | 更新 (リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 殺菌: 2587    | 殺菌+アル: 88 |
|          | リークチェック: 74   | 自己洗浄: 519                                            | アルコール単独: 18 | エア単独: 20  |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|-----------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 内視鏡接続コネクタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2014 年 1 月 21 日

ご署名 門脇 尚史

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷 3-12-5  
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

