

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26 年 1 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	1005150
作業年月日	平成 26 年 1 月 25 日		作業時間:	Hr
顧客名	森 71-227		TEL:	046-785-2236
所在地	神奈川県横浜市中区磯子 1-8-27		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シ-ル記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴 ※通常 200以上

・光量低下異常 (E:210) } 発生・異音・異臭・異振

・ラック・200本異常 (E:212) } 運転前 147 運転後 166

※運転 2 1回実施 異常ナシ (殺菌)

不具合原因、作業内容

・オゾン水濃度計の不具合 (オゾン水濃度計の部品交換実施)

交換後(90-207UP後) パルス 698 運転前

殺菌 12 2回運転実施 異常ナシ・パルス 628 運転後

点検項目			
フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

・オゾン水濃度計交換後 殺菌運転を2回実施しました。

異常 ナシ 終了しました。

装置 情報	交換後運転回数:	90	更新 (社内) 実施・未実施	殺菌:	6	殺菌+7h:	268
	リークチェック:	0	自己洗浄:	268	7h-1h単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐				☐	
排水栓		☐				☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 新内 雄 印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 環境事業部
サービスグループ
東京都江東区新砂 2-3-4 3
TEL (03) 6659-8284

責任技術者	作業者
	