

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26 年 3 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300108
作業年月日	平成 26 年 3 月 14 日		作業時間: Hr
顧客名	さいたま市 新開橋クリーンセンター 様		TEL: 048-295-8760
所在地	埼玉県さいたま市西区岩槻 408-1		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 25 年 11 月 16 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E: 1/1 排水経路 発見 3/10 1回 3/12 1回 3/13 2回 3/14 2回			
不具合原因、作業内容			
原因) 排水フィルターの交換 作業内容) 脱臭フィルター、給水フィルター、排水フィルター交換			
点検項目			
フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ 正常 ☐
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
フィルター交換後 消毒モードにて 1回 運転確認完了。 問題なし 終了しました。			

装置 情報	交換後運転回数: 1204 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌液 928	殺菌+7L: 276
	リークチェック: 0	自己洗浄: 8/	7Lノール単独: 0 エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		脱臭フィルター	(45/装)	☒	1
排水栓		☐		給水フィルター	(給水性)	☒	1
オゾン水濃度計		☐		排水フィルター	(新型)	☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		2014 年 3 月 14 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		ご署名 12 野 長 印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 環境事業部
サービスグループ
東京都江東区新砂 2-3-43
TEL (03) 6659-8284

責任技術者	作業者
	1126.3.14. 12 野