

IM-205



株式会社IMI

機械事業本部 営業サービス

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺

TEL 086-944-8528

FAX 086-942-9030



クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

お客様	名称	製造番号	ご確認	モリヲ 井上
	ルミネ北住産科クリニック様	100134		
	住所 東京都足立区千住旭町42-2	納入検査実施日 2016年7月24日		
	ルミネ北住店 9F	納入検査実施者 エムシーサービス(株) 星住		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ド ー バ ッ キン		ハンドル開閉検出確認	電 装 系		タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
		ドアロックユニット作動確認			ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ			電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶 体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外 装 ・ 設 置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	減圧温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚 1、トレイ 3キズ・汚れ		✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給 水 タ ン ク	✓	給水タンクの内部汚れ	制 御	✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない 蓋の取付取外しに問題が無いか			運転プログラムの確認(規定減圧温度・時間)
		装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いか)			タッチパネル表示確認・履歴の確認
排 水 タ ン ク		LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性 能 評 価		B&Dテスト実施
	✓	タンク内に汚れはないか			リークチェックテスト
		フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致			0点調整
		装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いか)			付属品の確認・銘板・メンテナンス板記入貼付
ス ペ ー ス	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	そ の 他	✓	運転・お手入れ方法の説明
					装置内運転時異音

特記事項

設置スペース、右、左、~~50~~70mm、背面75、天面OK。
※、コンセントの形状が違いため、運転確認が出来ませんでした。