


IM-205



株式会社IHI
機械事業本部 営業
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新町10-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

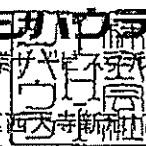

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

モリタ用

お客様	名称	製造番号	ご確認	モリタ A.L.
	住所	納入日		
	納入検査実施者			
	ルミネータ住友歯科クリニック様	100123		
	東京都足立区千住地町42-2	2016年7月24日		
	ルミネータ住友9F	納入検査実施者 エムシーサービス(株)星住		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア		開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
		ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御		運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
		洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ			タッチパネル表示確認・履歴の確認
		洗剤投入量の確認		有	ラック仕様切換(ハンドピースラック・標準ラック)
		ローラーポンプの動作確認		無	温水使用切換
給排水		外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能		インジケータによる残渣判定(TOSI)
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)			周波数と設置ICWの一致
		お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水/湯逆配管NG)	その他	✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
		給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)			運転・お手入れ方法の説明
		給湯温度(45～50℃)			装置内運転時異音・振動
電装系		タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果	☐ 良好	トシ
		ディスプレイの色あせ・表示確認		☐ 不良	
		電源スイッチの作動状態			
	✓	SDカードの挿入・取外性			
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

特記事項

コンセントの形状が異なるため運転確認が出来ませんでした。