

込谷クリニック 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 菅田 和樹

点検年月日	平成26年 4月 15日	機種名	ONW-1DB	製造機番	001847
設置場所				TEL	
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源錠	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット錠	正常	☒	交換	☐
運転/停止錠	正常	☒	交換	☐
アルコールモード錠	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
常光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水温度	正常	☒	濃度:	0.4 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素配管	正常	☒		
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	
	交換 ☐		
	交換 ☐		
	交換 ☐		

2014年 4月 15日

ご署名 込谷 淳一



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 ONW-10B 作業チェックリスト

株式会社 川島パワラ

環境事業部

日付: 2014年 4月 15日 作業者 菅田和樹

ONW-10B 機番: 00/847

客先: 込谷フリエール 様

定期交換部品	
排水シリコンチューブを交換したか	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付けしているか	合/否
酸素ガス配管確認	
ポンプレギュレーターの圧力計の指針は正常に動くか	合/否
ポンプレギュレータの二次側圧力は正常か (0.21~0.29Mpa)	合/否
酸素ポンペ~ONWまでの配管に漏れは無いか	合/否
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min) (0.75 L/min)	合/否
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否
確認事項	
フタパッキンに割がれはないか	合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか (汚れある場合清掃)	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否
定期点検カウンタをリセットしたか (フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否
確認試験	
別紙 点検確認書に記録したか	合/否
オゾン水濃度の確認 (0.3mg/L以上)	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否
運転プログラムのバージョン確認 (平成21年6月現在「11」が最新)	合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)