

高沢胃腸科外科 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者:

山田

点検年月日	平成26年 5月 20日	機種名	ONW-10	製造機番	000599
設置場所	1F	TEL	0276-45-1133	御対応者	
設置時期		使用時間			

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.3 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 90.5% 流量: 0.77 L/min 圧力: 0.091~0.158 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

26年 5月 20日

ご署名 高木 文彦



内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 2014. 5. 20

作業者 岡田

ONW-10機番: 000599

PSA機番: SPS-11589

客先: 高沢胃腸科外科 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-10907)	☒ 合 / 否
ドレン用フィルターを交換したか	☒ 合 / 否
排水シリコンチューブを交換したか	☒ 合 / 否
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 合 / 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 合 / 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 合 / 否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (± 0.005 Mpa以内)	☒ 合 / 否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上)	(90.5 %) ☒ 合 / 否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min)	(0.77 L/min) ☒ 合 / 否
PSA圧力の確認	(0.091 Mpa) ~ (0.158 Mpa) 参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	☒ 合 / 否
フロントパネルのランプは配線したか	☒ 合 / 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 合 / 否
ドレンチューブは接続したか	☒ 合 / 否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	☒ 合 / 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ 合 / 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒ 合 / 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 合 / 否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	☒ 合 / 否
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 合 / 否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	☒ 合 / 否
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 合 / 否
インジケータの変色は良好か	☒ 合 / 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)