

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

|       |                                                                             |                                                                       |                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                         |                                                                       | 製造番号 : 100775      |
| 作業年月日 | 平成 26 年 5 月 22 日                                                            |                                                                       | 作業時間 : 1.5 Hr      |
| 顧客名   | 川口クリニック                                                                     |                                                                       | TEL : 0423-97-3741 |
| 所在地   | 東京都東村山市本町2-3-2                                                              |                                                                       | 担当 様               |
| 販売店   | (サ-ビス)                                                                      |                                                                       | 担当 様               |
| 納入年月日 | 平成 25 年 6 月 6 日                                                             | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |                    |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                 | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |                    |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施 (サ-ビス)

点検項目

|          |                                                                               |           |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 497    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|      |                                         |            |             |
|------|-----------------------------------------|------------|-------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数 : 1449 → 0 (更新 (リセット) 実施 ・ 未実施) | 殺菌 : 655   | 殺菌+7L : 794 |
|      | リークチェック : 0                             | 自己洗浄 : 216 | 7L単独 : 0    |
|      |                                         |            | エア単独 : 1    |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称     | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 給水フィルタ-(糸) |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |            |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |            |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |            |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |            |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H26 年 5 月 22 日

川口クリニック  
医師 川口敏樹



ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷 3-12-5  
TEL : 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

土屋