

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300017
作業年月日	平成 26 年 3 月 7 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	いいぬまクリニック		TEL: 0463-89-1555
所在地	神奈川県秦野市堀川173-1		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 25 年 3 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1/17, 2/13: 光量低下異常(点検), ランプ点検異常(点検)

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

バルブ数 625

履歴 0.7 / ppm

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

実により、機械が正常に動作していない状態でのエラーが発生していました。同様のエラーの場合、電源を入れた後10分以上経過してから、再度運転して下さい。排水用バルブ、内蔵バルブ

装置情報	交換後運転回数: 926	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 926	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 3/5	7L単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	活性炭フィルタ		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H26 年 3 月 7 日

ご署名 飯沼克博 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

