

メーカー



株式会社IHIシバウラ

環境事業部 環境サービスGL

〒704-8122 岡山県岡山市東区巨大寺町10番6

TEL 086-944-0528

FAX 086-942-9030

IC ClaveクラスBオートクレーブ設置報告書

お客様	名称	製造番号	ご確認	先崎 優里香
	L 歯科クリニック	100060		
	住所	納入検査実施日 2017年2月22日		
	納入場所	納入検査実施者 (株)モリタ 増岡有華子		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置		行程表示LEDの点灯
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	網カゴ、破損・汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	運転プログラムの確認
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ			入力・出力確認
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	✓	B&Dテスト実施
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ			リークチェックテスト
異常なし ✓			その他	✓	付属品の確認
				✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音

備考			

メーカー

クラスBオートクレーブ IC Clave 使用上の注意

※クラスBオートクレーブ【IC Clave】を使用するにあたり、取扱説明書と添付文書に沿って、取扱い方法と安全性のための注意事項をご確認ください。以下の条件を満たさない場合、誤作動を引き起こす可能性があります。

☒	運転中はドアを開けないでください。また、本体、特にドア部分は高温となりますので触らないでください。火傷の原因となります。
☒	本品はメーカー指定の医療機器以外のものには使用しないでください。また、書毒薬や蒸留水等の液体、可燃性・引火性・爆発性の液体やガスを滅菌しないでください。故障や事故の原因となります。
☒	供給水は精製水（純水、蒸留水）以外は使用しないでください。故障の原因となります。
☒	被滅菌物に設定温度による滅菌処理可のマークが無い場合は滅菌しないでください。また、密封された被滅菌物は滅菌しないでください。被滅菌物の破損の原因となります。
☒	被滅菌物が濡れた状態で滅菌しないでください。被滅菌物不良の原因となります。
☒	1度の運転における器材処理量は、滅菌トレーまたは網バスケットの7割までの容量を目安に入れてください。
☒	滅菌トレー使用時：被滅菌物を小分けにして滅菌バッグに入れ、不織布面を上にして、滅菌バッグが重ならないように配置してください。
☒	・網バスケット使用時：フィルム面同士・不織布面が向き合うように並べて配置してください。

☑	1年に1度、または、1000回運転毎に、定期点検および部品交換を受けてください。（エアフィルターのみ400回運転毎に交換）定期点検および部品交換ご自身で行わないでください。定期交換時期になると、タッチパネルに表示がでます。販売店へ依頼し、交換を行ってください。 ⇒特定保守管理医療機器に該当します。保守点検はユーザー様の義務となります。
---	--

点 検 項 目	頻 度
ドアパッキンの清掃	毎週
缶内、滅菌トレーの清掃	毎週
給水タンクフィルターの清掃	毎週
缶内フィルターの清掃	毎週
製品外観の清掃	毎週
給水タンクの清掃	2週間毎
エアフィルターの交換	400回毎 もしくは3ヶ月毎
ドアパッキンの交換	1000～2000回毎、 もしくは1年毎
定期メンテナンス	1000回毎、 もしくは1年毎

点 検 項 目	頻 度
電磁弁の交換	不定期交換
真空ポンプの交換	不定期交換（3～4年）
水ポンプの交換	不定期交換（3～4年）
蒸気ジェネレータエレメントの交換	不定期交換
滅菌器缶内の清掃	2年毎
配管回路のチェック	2年毎
電気回路のチェック	2年毎
ドアロック機構の確認	2年毎
ドアパッキン エアフィスターの確認	2年毎
真空ポンプの確認	2年毎

☑	この製品には取扱説明書の巻末に「保証書」がついています。保証書は販売店で所定事項を記入いたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管してください。保障期間はご購入の日から1年間です。保障期間中の修理は、保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をお読みください。
---	--

下記の販売説明員から装置の安全な取扱いと操作及び保証書の内容について説明を聞きました。

2017 年 2 月 22 日

お客様のお名前

し 歯科クリニック 先崎 優里香

納入説明者氏名

株式会社 モリタ 増岡 有華子
