

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 300148
作業年月日	平成 26 年 4 月 24 日		作業時間: Hr
顧客名	さいたま新開橋クリニック		TEL: 048-795-4760
所在地	埼玉県さいたま市西区宮前408-1		担当 様
販売店	サンメディックス株式会社		担当 様
納入年月日	平成 25 年 11 月 26 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

濃度制御注意 (F:109) X 4 : 3/12, 3/24
排水注意 (F:111) X 6 : 3/12, 3/12, 3/12 X 2, 3/14 X 2

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

バルブ数 399

履歴 0.72 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

約5ヶ月位で1500回と為る為、次回点検は約5ヶ月後、8~9月頃と予定と致す。

装置 情報	交換後運転回数: 1638	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 1256	殺菌+アル: 382
	リークチェック: 0	自己洗浄: 118	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26 年 4 月 24 日

ご署名 苗田 優子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

