

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100487
作業年月日	平成 26 年 4 月 8 日	作業時間: 1.0 Hr
顧客名	いとう内科胃腸科医院	TEL: 0297-42-1666
所在地	茨城県常総市古間木新田817-1	担当 様
販売店		担当 様
納入年月日	平成 24 年 4 月 11 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
1/1 光量低下異常, ランプ切れ	
不具合原因、作業内容	
OED-1000定期保守点検作業実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 450
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☐
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
光量内部 運転動作正常 26/07 時. 無水エラーで使用不能解消済	

装置 情報	交換後運転回数: 499	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 134	殺菌+7L: 896
	リークチェック: 0	自己洗浄: 457	アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		26 年 4 月 8 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 下南 敬子		印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	