

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号 : 100225
作業年月日	平成 26 年 5 月 13 日		作業時間 : Hr
顧客名	若林医院		TEL : 042-362-1611
所在地	東京都府中市片町3-21-1		担当 様
販売店	東邦薬品株式会社		担当 様
納入年月日	平成 23 年 5 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目	定期点検ソール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
オーバーフロー異常 (E:205) 5/17 ~ 8/16 26日			
不具合原因、作業内容			
OED-1000定期保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 656
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
乾燥がしつかりとて本と別装置に使用されてはし入。 Ver 01-3 → Ver 01-07			

装置 情報	交換後運転回数 : 202	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌 : 5	殺菌+7L : 623
	リークチェック : 0	自己洗浄 : 602	7Lアルコール単独 : 1	エア単独 : 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	26 年 5 月 13 日 若林若幸 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
 東京都文京区本郷3-12-5
 TEL : 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	山本