

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

02-35250

No. 121218

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店	殿	機種	ONW-10
客先	1	所在地	東京都中央区銀座8-4-26		機番	000098
環営	1	ユーザー名	渡辺内科クリニック様（定期メンテナンス契約）		納入日	平成15年03月14日
		点検者	小野定之	作業時間	受付日	平成24年05月21日
		返送先	納入先と同じ		出荷日	平成24年12月18日
計	2					

修理依頼・苦情内容

- ・電源がOFFの状態でも、水が水槽に流れ込む。
- ・エラー18（残水あり）・・洗浄槽の水を排出中に「18」を表示するので正常な動作です。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

給水電磁弁のダイヤフラムが劣化して閉まらない状態になっていました。。
この他に下記の不具合を見つけましたので修理いたしました。

- ①「給水量エラー」・・レベルセンサASSY (Lo) 劣化につき交換（写真；2）
- ② 洗浄槽左上面側に亀裂・・亀裂箇所を溶接修理（写真；3）


写真；1

定期交換部品
給水電磁弁ダイヤフラム
オゾンセンサーASSY



写真；2

レベルセンサーASSY
排水シリコンチューブ

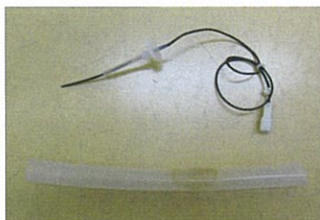

写真；3

洗浄槽（割れ）



〔2〕修理・点検内容

1. 修理および定期交換部品の交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.53～0.64mg/L・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・正常
酸素濃度：91.0 % 酸素流量：0.77 L/min 圧力：0.095～0.171MPa（AC100V、50Hz）
4. 運転動作確認・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・黄土色ですが正常です。 現品を貼付しました。

—以上—

交換部品

承認					
作成2	部品番号	部品名称	数量	備考	
H24. 12. 19 中澤	762280690	フィルタショックバイセット M	1式	定期交換部品	写真；1
		給水電磁弁ダイヤフラム	2個	故障原因	写真；1
作成1	762301322	オゾンセンサーASSY	1個	性能劣化	写真；1
	762301210	レベルセンサーAASY (Lo 側)	1個	今回無償	写真；2
H24. 12. 19 小野	762231680	排水シリコンチューブ	1個	今回無償	写真；2
		洗浄槽の亀裂修理	1式	今回無償	写真；3