

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 5月 2日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100106
作業年月日	平成 26年 4月 25日		作業時間:	Hr
顧客名	ついで医院		TEL:	045-790-3676
所在地	神奈川県横浜市金沢区能見台通1-2白樺ビル3F		担当	様
販売店	富士ケルメテカル		担当	様
納入年月日	平成 22年 6月 22日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・タケパネルの表示が不明(暗い状態にてタケを行っても作動しない)
- ・数日前より発生していたが、背面の電源の入り切りにより作動はしていました。
- ・今回1回目の運転は正常でしたが、2回目より電源の入り切りでも作動はしていませんでした。

不具合原因、作業内容・タケタケ間にカビ発生が見受けられたので清掃を実施しました。

- ・タケパネルの不具合と思われる。
- ・今回タケ作業中は不具合は発生しませんでした。以前の状況よりタケパネルの交換を実施しました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パネル数 287
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 / ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

- ・タケパネル交換後、電源の入り切り、運転運転、回欠運転を実施しました。
- ・問題は発生致していませんでした。

装置 情報	交換後運転回数:	更新(リセット)実施・未実施	殺菌:	殺菌+アル:
	リークチェック:	自己洗浄:	アルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		タケパネル		☒	1
排水栓		☐				☐	
オゾン水濃度計		☐				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2014年 5月 2日

ご署名 阿部 美奈子 印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 環境事業部
サービスグループ
東京都江東区新砂 2-3-43
TEL (03) 6659-8284

責任技術者 作業者

