

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 _____

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100113
作業年月日	平成 26 年 6 月 26 日		作業時間: _____ Hr
顧客名	高戸橋クリニック		TEL: 03-3200-3060
所在地	東京都新宿区高田馬場2-5-24		担当 様
販売店	オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社		担当 様
納入年月日	平成 22 年 6 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 <u>4</u> 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
1/24 光量低下異常 1 7/2 光量低下注意 (R:100)
(R:270)

不具合原因、作業内容
OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 501
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
7/2 ハンカチで拭きかたしあり 配管動作正常

装置 情報	交換後運転回数: <u>899</u>	更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: <u>3/22</u>	殺菌+7L: <u>592</u>
	リークチェック: <u>1/2</u>	自己洗浄: <u>1/6</u>	7Lコールド: <u>2/3</u>	エア単独: <u>730</u>

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2014 年 6 月 26 日

ご署名 水越 晶子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	