

保守点検・修理 報告書

管理 No. 120925
発行日 平成 24年 9月 25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号：	1000023
作業年月日	平成 24年 9月 24日		作業時間：	3 Hr
顧客名	新鋭工業（株） 東京支店 デモ機		TEL：	03-3816-0444
所在地	東京都文京区本郷 3-2-15		担当	中川様、服部様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	トレ、コード、給排水ホース
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
向ヶ丘久保田クリニック様で運転中にオゾン水生成異常発生 (洗濯ネットをトレイ無でOEDに入れて運転したら異常が出た)			
不具合原因、作業内容			
水ポンプの吸引口に洗濯ネットが張り付いて、水ポンプ～オゾナイザの配管内が負圧になり 水槽の水がオゾナイザに逆流して性能がダウンしたことが原因。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 277
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
オゾナイザを乾燥させて復旧しました。			

装置 情報	交換後運転回数：287⇒0		更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施		殺菌：	378	殺菌＋ﾌﾙ：	105
	リークチェック：12		自己洗浄：49		ﾌﾙｺｰﾙ単独：	1	エア単独：	25

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	次回			☐	
排水栓		☐	次回			☐	
オゾン水濃度計		☐	次回			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☐	次回			☐	

機械受付日：平成 24年 9月 18日 機械出荷日：平成 24年 9月 25日
修理品管理票 No. 02-35741

修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL：086-944-6528

責任技術者	作業者