

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100399
作業年月日	平成 26 年 7 月 2 日		作業時間: Hr
顧客名	長谷川病院		TEL: 043-444-0137
所在地	千葉県八街市八街に85		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 23 年 9 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/27: 殺菌時給水異常 (E:202) → 水道の蛇口が開いていて生じる場合は殺菌槽内の真下にある排水栓に物が詰まっていたかを確認して下さい。

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施 (通常は9月であるが、希望により2ヶ月早めた)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 667
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 槽内清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

使用後に自己洗浄を行い槽内に残っている水分をよく乾燥させて下さい。

装置情報	交換後運転回数: 40	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 26	殺菌+7L: 152
	リークチェック: 65	自己洗浄: 9	7L単独: 0	エア単独: 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

26 年 7 月 2 日

ご署名 大田児 真理子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	