

遠藤医院 御中

点検確認書

株式会社 IHI シパウラ
環境事業部

点検担当者: 中村

点検年月日	平成26年 7 月 15 日	機種名	ONW-10B	製造機番	001482
設置場所				TEL	042-952-2296
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.4	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素配管	正常	☒				
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☐	調整	☒	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
オゾン分解触媒	交換 ☒	アルコールタンクレベルセンサー部に わずかに漏れあり。シリコンで対応 しました。気になるようであれば、 ご連絡下さい。(IHI シパウラへ)
	交換 ☐	
	交換 ☐	
	交換 ☐	

26年 7 月 15 日
埼玉SC 遠藤医院
ご署名 遠藤医院 印
TEL 042-952-2296

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付:平成26年 7月15日

作業者 中村

ONW-10機番: 001482

PSA機番: SPS- —

客先: 遠藤医院

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- —)	合/否	(合)
ドレン用フィルターを交換したか	合/否	(合)
排水シリコンチューブを交換したか	合/否	(合)
オゾン分解触媒を交換したか	合/否	(合)
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否	(合)
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否	(合)
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否	
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上) (— %)	合/否	
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min) (— L/min)	合/否	
PSA圧力の確認 (— Mpa) ~ (— Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	合/否	(合)
フロントパネルのランプは配線したか	合/否	(合)
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否	(合)
ドレンチューブは接続したか	合/否	(合)
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	合/否	(合)
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否	(合)
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否	(合)
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否	(合)
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否	(合)
別紙 点検確認書に記録したか	合/否	(合)
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否	(合)
運転は正常か、エラーはでないか	合/否	(合)
インジケータの変色は良好か	合/否	(合)

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

アルコールタンクレベルセンサーの線の根元辺りから濡れあり。
シリコンもぬって対応しました。