

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100682
作業年月日	平成 26 年 4 月 28 日	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	中島外科胃腸科内科	TEL: 047-483-2416
所在地	千葉県八千代市勝田台4-36-6	担当 様
販売店	株式会社メディセオ	担当 様
納入年月日	平成 25 年 5 月 13 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐
トレイ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒

殺菌槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌チューブ類	正常	☒
	正常	☐

バルブ数 487

履歴 0.72 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

機器作動点検問題なし。定期交換部品の交換を実施。
今回メンテナンス料金はサービス。次回点検日はH27 4月頃とします。

装置 情報	交換後運転回数: 268 → 0 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 270	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 178	7Lアルコール単独: 0
			エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H26 年 4 月 28 日

ご署名

中島 天祐

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

土屋