

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 _____

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100546	
作業年月日	平成 26 年 6 月 11 日		作業時間	Hr _____	
顧客名	西島消化器内科クリニック		TEL	04-2923-0005	
所在地	埼玉県所沢市東狭山ヶ丘1-27-20		担当	様	
販売店	ニスコ株式会社		担当	様	
納入年月日	平成 24 年 7 月 2 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2 年 2 回目	定期点検シール記入	☒
出張 ・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴
不具合や異常は特になし

不具合原因、作業内容
OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 504
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 1.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
7/24 殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
乾燥に気をつけ、27日行旅に使用されていした 排水と字が読難し。

装置 情報	交換後運転回数： 277	更新（リセット）実施・未実施	殺菌： 137	殺菌+7L： 374
	リークチェック： 0	自己洗浄： 365	7Lアルコール単独： 2	エア単独： 386

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	コントロール基盤		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H26 年 6 月 11 日

ご署名 平岡 美輝 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL : 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	