

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年 7月30日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100220
作業年月日	平成26年 7月30日		作業時間:	2 Hr
顧客名	宇都宮県庁 様		TEL:	
所在地	栃木県 宇都宮市屋敷町561-3		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成24年 3月25日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・2ヶ月前の点検より、オゾン発生量減少（異状発生）

不具合原因、作業内容

・2ヶ月前の点検より、オゾン発生量減少（異状発生）
（オゾン発生量の交換）

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 表示数 2.49
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・2ヶ月前の点検より、オゾン発生量減少（異状発生）
・オゾン発生量の交換後、オゾン発生量表示、問題なく正常に動作。
・殺菌+アルコール 1回、自己洗浄 1回、殺菌 1回、濃度確認終了。

装置情報	交換後運転回数: 526	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 257.3	殺菌+7A: 256
	リークチェック: 0	自己洗浄: 578	7A単独: 11	エア単独: 80

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		2ヶ月前の点検		☒	1
排水栓		☐				☐	
オゾン水濃度計		☐				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成26年 7月30日

ご署名 小島 麗香 印

修理業者 株式会社 IHI シンワラ 環境事業部
サービスグループ
東京都江東区新砂 2-3-43
TEL (03) 6659-8284

責任技術者

作業者

