

## クラスB オートクレーブ BC-17点検表

IHIシバウラ用

お客様	名称 デジタルクリニックスピアDesign 住所 渋谷区東横1-7-13	製造番号 13100041 点検時期 1103回	点検実施日 2017年5月10日 点検実施者 伊住	ご承認印 
納入場所	サービス形態 定期保守	モリタ担当部署 東京営業部、井上様		

## 計装(安全)

- ドア 壓力計0点指示誤差
- フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- フック取付け状態・動作確認
- フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ピス・ナット・ホーローセット増し締め
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック検出ユニット作動確認
- ドアロックユニット作動確認
- 蓋板のキズ・汚れ

## 缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無 清潔
- 減菌温度センサの汚れ
- 网カゴの破損・汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ 清潔

## 配管系

- フジソ樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排蒸弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損 つまみあり
- 安全弁(減菌室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ラジエターの取り付け状態・漏れ

## 蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆支弁の作動状態・漏れ

## 真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度 -92 kPa

## 給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ 清潔
- 盖・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ 清潔

## 排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ 清潔
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

## 電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター締み確認
- 端子の締み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の締み・変色有無(ボイラー・乾燥)

## 外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタットの締み・設置状態 アジャスターの助かり、ショーンのへこみ例
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

## 制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

## 消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ 交換
- エアーフィルターのつまり・汚れ 交換 メッセージ発生中

## 性能評価

- B&Dテスト実施
- ケミカルインジケーターによる判定
- リークチェック
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)

給水タンク内の細菌汚れあり、フローの動作悪化を防ぐため清掃。

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

運転確認	
V	OK
交換部品(名称・型式)	数量
ドアパッキン	1



株式会社IHI  
機械事業本部営業部 営業サービス  
〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030