

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年 9 月 10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	300188
作業年月日	平成26年 9 月 10 日		作業時間:	3.0 Hr
顧客名	さいたま新聞機くり27		TEL:	048-795-4760
所在地	さいたま市西区宮前 408-1		担当	様
販売店	サンメックス		担当	様
納入年月日	平成25年 11 月 26 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

・定期点検部品交換
・排水フィルタ・2台設置

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 473
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期点検異常なし
2台設置後、様子を見ながら確認。

装置 情報	交換後運転回数: 1668		更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 2555	殺菌+7L: 752
	リークチェック: 0	自己洗浄: 224		7Lコル単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解菌乾燥		☒	1	コネクタ系迷子(本体側)		☒	2
排水栓		☒	1	コネクタ系迷子(コネクタ側)		☒	2
濃度計フィルタ	401040000	☒	1	カニ口接続ジョグ		☒	1
オゾン濃度計 ASSY		☒	1	迷子送水側高栓		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

中田


印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
HIJIMATSU 中澤	河野

殺菌:2553 消毒+アルコール:752 リークチェック:0 自己洗浄:224

1:排水フィルタ 並列接続で設置

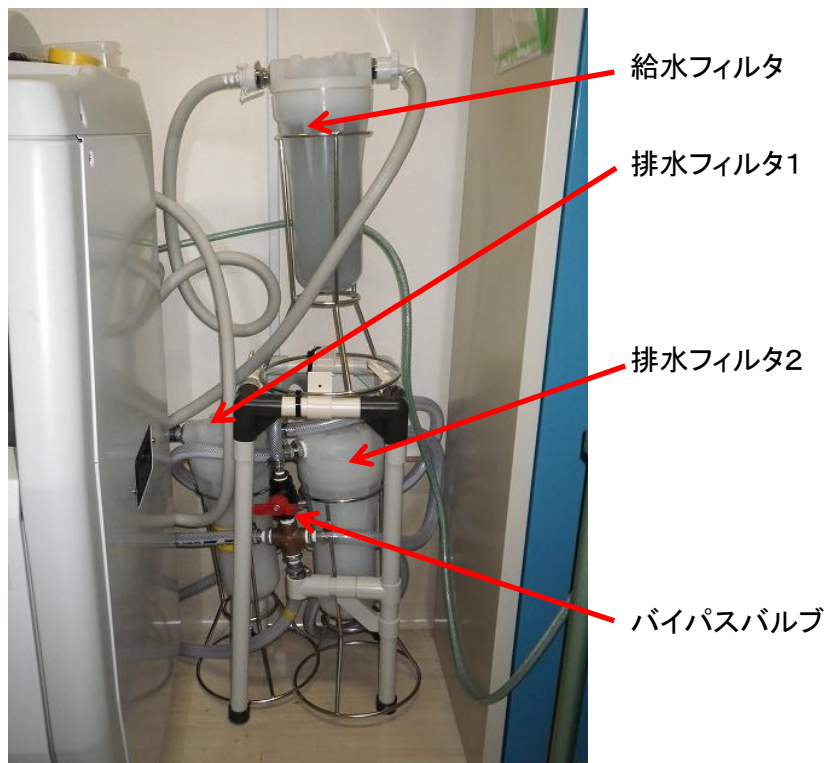

2:排水フィルタ 設置前(左) 設置後(右)

★機械が出っ張ると怒られるので注意



排水時間:1分58秒



排水時間:1分34秒

3:内視鏡写真

オリンパス製膀胱スコープ フジ製:EG-530NW、EG-530N2、EG-590MP・・・2本



4:チタン製フィルタ

白いものはタオル？の繊維であった。流水で簡単に取り除けた



4:E-103閉止プラグ破損の応急対策

