

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100579
作業年月日	平成26年9月3日	作業時間:	約1.5 Hr
顧客名	秋津医院様	TEL:	03-5749-2062
所在地	東京都品川区戸越3-1-2	担当	様
販売店		担当	様
納入年月日	平成24年9月25日	保証期間	内口外
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年2回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

11/1(2), 3/12(2), 3/14(2), 4/18(2), 7/1(2), 7/16(1) 殺菌時給水異常 (E202)
7/2 殺菌槽異常 (E01), 異常今回点検時リセット実施。

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 567
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

下記部品交換及び運転確認実施しました。特に問題なし。
次回点検予定は H27 9月頃といたします。

装置情報	交換後運転回数: 99⇒0 (更新) (リセット) 実施・未実施	殺菌: 92	殺菌+アル: 47
	リークチェック: 0	自己洗浄: 27	アルコール単独: 0
			エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	1
排水栓		☒	1	アルコール基ベン		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

土屋