

次回 O2 汚水処理機 1m2 以内にもいい。

(新鋭工業)

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100647
作業年月日	平成 26 年 8 月 11 日	作業時間: 約 1.5 Hr
顧客名	西調布 井上クリニック	TEL: 042-426-0155
所在地	東京都調布市上石原1-39-1	担当 院長 様
販売店	アルフレッサ株式会社	担当 長崎 様
納入年月日	平成 25 年 8 月 12 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

(前回) E207 故障 7日

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 488
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒ (交換実施)		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

下記定期交換部品の交換実施。作動点検実施→特に問題なし。
年間(2月24日)、バルブス2-7、基礎交換実施。後3の排水口型を(1mm用)ものに交換

装置 情報	交換後運転回数: 0	更新(リット)実施・未実施	殺菌: 272	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 36	自己洗浄: 173	7L単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒				☐	
排水栓		☒				☐	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H26 年 8 月 11 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

土屋