

点検確認書

新鋭工業 東京支店  
03-3816-0444

点検担当者: 山本 西野

点検年月日	平成 26年 10月 2日	機種名	ONW-10	製造機番	001192
設置場所				TEL03-3976-6411	
設置時期	平成 21年 7月 14日	使用時間	4,340 (1856)	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
フィルタリセット釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
運転/停止釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
アルコールモード釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
ランプ類						
操作パネル	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
蛍光灯	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
洗浄動作						
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
給水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 エアパージ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
アルコールフラッシュ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
オゾン分解ファン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
排水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
性能確認						
オゾン水濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度:	0.50 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>				
酸素発生	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度:	91%	流量:	0.78 L/min
					圧力:	0.098~0.168 MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
装置内	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
清掃						
外装	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>		
内部	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>		
洗浄コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
洗浄チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一式	定期点検実施。左記部品交換。 使用回数が多いので可成り の状態で可。(内部劣化有り) 次回はH27.10月位内可。
吸湿筒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一式	
ドレン用フィルタ	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一個	
オゾン分解触媒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一個	
吸盤	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	3個	

年 月 日  
ご署名 内田 敦海 印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 ONW-10 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ  
環境事業部

日付: 年 月 日 作業者 \_\_\_\_\_  
ONW-10 機番: \_\_\_\_\_ PSA機番:SPS- \_\_\_\_\_ 客先: \_\_\_\_\_ 様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- _____ )		合/否
ドレン用フィルターを交換したか		合/否
排水シリコンチューブを交換したか		合/否
オゾン分解触媒を交換したか		合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか		合/否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)		合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) ( 91 %)		合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) ( 0.98 L/min)		合/否
コンプレッサ圧力(最大圧力0.140Mpa以上) (最低 0.098 Mpa~最大 0.168 Mpa)		合/否
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか		合/否
フロントパネルのランプは配線したか		合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か		合/否
ドレンチューブは接続したか		合/否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか		合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か		合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)		合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)		合/否
別紙 点検確認書に記録したか		合/否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)		合/否
運転は正常か、エラーはでないか		合/否
インジケータの変色は良好か		合/否
運転プログラムのバージョン確認(平成21年6月現在「10」が最新)		合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)