

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 300215
作業年月日	平成 26 年 8 月 26 日	作業時間: 1.2 Hr
顧客名	田村クリニック	TEL: 042-3560-677
所在地	東京都多摩市落合1-32-1多摩センター交通財団ビル4階	担当 様
販売店	株式会社 メディセオ	担当 様
納入年月日	平成 26 年 2 月 27 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴
不具合、異常は有りなし。

不具合原因、作業内容
OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED 正常 ☒ エアライン 正常 ☒ オゾン水濃度計動作 正常 ☒ ハルス数 406 排水栓、排水ライン 正常 ☒ 細管送水ライン 正常 ☒ 排気ライン 正常 ☒ オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 2.69 ppm 異常音、振動 正常 ☒ 電源コード 正常 ☒ 殺菌チューブ類 正常 ☒ 正常 ☐
酸素ライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	
トレー	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
コネクタ吸引口に取付付与あるメクラ等は5枚しめすかおおよそに注意して下す。

装置 情報	交換後運転回数: 1540	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 813	殺菌+7L: 727
	リークチェック: 1	自己洗浄: 1/38	7L単独: 106	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	エアクリーン		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	