

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100526
作業年月日	平成 26 年 8 月 26 日		作業時間: 約 2 Hr
顧客名	住吉クリニック病院		TEL: 029-247-2251
所在地	茨城県水戸市住吉町193-97		担当 様
販売店	株式会社 スズケン 水戸支店		担当 様
納入年月日	平成 24 年 9 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 0.69
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 292 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒ (交換)		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
 ※ 今回のメンテナンスはH26 8~9月頃です。
 下記定期交換部品の交換、作動点検実施。作動時に問題ありませんでした。
 2015年3月頃 フィルタ-のみの交換時期となります。(フィルタ-交換代金10000 税別)です。

装置 情報	交換後運転回数: 97870 (更新) (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌: 212	殺菌+アル: 0
	リークチェック: 1	自己洗浄: 145	アルコール単独: 0
			エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		内視鏡接続コネクタ		☒	
排水栓		☒		コントロール基盤		☒	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H26 年 8 月 26 日

茨城県水戸市住吉町193-97

住吉クリニック病院

ご署名 T310-0844 TEL 029-247-2251

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
 東京都文京区本郷3-12-5
 TEL: 03-3816-0444

責任技術者 作業者

西野 土屋