

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100268
作業年月日	平成 26 年 8 月 18 日		作業時間: Hr
顧客名	井上クリニック		TEL: 047-455-5335
所在地	千葉県船橋市前原東5-13-4		担当 様
販売店	株式会社 メディセオ		担当 様
納入年月日	平成 23 年 8 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

6/18 14:49 オゾン水生成異常 (E:202)

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☐
水漏れ確認	正常	☐
清掃	正常	☐ 7/9 清掃 ☒
トレー	正常	☐
殺菌槽コネクタ	正常	☐

殺菌槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☐
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌チューブ類	正常	☒
	正常	☐

バルブ数 533

履歴 0.18 ppm

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

7/9付迄 黒い泥水が多量、分解清掃実施。乾燥後11時57分より正常稼働して

装置 情報	交換後運転回数: 946	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 1329	殺菌+7L: 1132
	リークチェック: 11/50	自己洗浄: 105	7Lコイル単独: 0	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2014 年 8 月 18 日

ご署名

井上

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

