

間柴医院 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 小野

点検年月日	平成 26 年 11 月 25 日	機種名	ONW-10	製造機番	000548
設置場所				TEL:	
設置時期	平成 17 年 12 月 2 日	運転回数	10367	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄・順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄・逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度:	92.0 %	流量:	0.76 L/min
水漏れ確認						
装置外	正常	☐	調整	☒	交換	☐
装置内	正常	☐	調整	☒	交換	☐
清掃						
外装	正常	☐	清掃	☒		
内部	正常	☐	清掃	☒		
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	1	フィルタ - 2 200
吸湿筒	1	
ドレン用フィルタ	1	
オゾン分解触媒	1	

ご署名 中野 拓 印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 2008. 11. 25.

作業者 小野

ONW-10機番: 000588

PSA機番: SPS- 11509

客先: 関柴 医院

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- 10672)		合/否
ドレン用フィルターを交換したか		合/否
排水シリコンチューブを交換したか		合/否
オゾン分解触媒を交換したか		合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか		合/否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (± 0.005 Mpa以内)		合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上)	(92 %)	合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min)	(0.76 L/min)	合/否
PSA圧力の確認	(0.081 Mpa) ~ (0.149 Mpa)	参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか		合/否
フロントパネルのランプは配線したか		合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か		合/否
ドレンチューブは接続したか		合/否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか		合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か		合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)		合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)		合/否
別紙 点検確認書に記録したか		合/否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)		合/否
運転は正常か、エラーはでないか		合/否
インジケータの変色は良好か		合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

- ・洗浄槽 汚れ あり (清掃)
- ・タンクホースより水漏れ (修理) 内部 汚れ あり,
- ・アッパーと洗浄槽 スキムより水漏れ (7-70 補修)
- ・フィルタ 2 欠品 (次回の点検時 持参下さいと云う)