

IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業名用
H-Iアグリテック用

お客様	名称	閉口歯科医院	製造番号	1407031	点検実施日	2017年11月27日	ご承認印	A月D
	住所	さいたま市浦和区上木崎5-16-1	運転回数	1103回	点検実施者	中村(竜) 中村(裕)		
	納入場所		サービス形態	定期保守点検	モリタ担当部署	北関東市川様		

計装(安全)



圧力計0点指示誤差

ドア



フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認



開閉ハンドル取付け状態・動作確認



フック取付け状態・動作確認



フックパネ・フック螺番ピンの取り付け状態



ビス・ナット・ホーローセット増し締め



ドアカバーの取り付け状態・割れ



フック検出ユニット動作確認



ドアロックユニット動作確認



蓋板のキズ・汚れ



開閉ハンドルの損傷確認

缶体



割れ・キズ・腐食・汚れの有無、清掃



滅菌温度センサの汚れ



網カゴの破損・汚れ



缶内ストレーナーの損傷・汚れ、清掃



電装系



タッチパネルの動作状態・キズ・汚れ



ディスプレイの色あせ・表示確認



電源スイッチの動作状態



行程表示LEDの点灯



電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ



各基板のコネクター緩み確認



端子の緩み・コネクターの接続確認



配線の変色・損傷有無・結束状態



圧力センサーの取付け状態・入力確認



ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)



インジケータ貼り付け

運転確認

合

否

蒸気発生器



ソケット他溶接割れ・漏れ



フランジパッキン漏れ



ヒーター取り付け状態・漏れ



空焚き防止器・温度センサ取り付け状態



電磁ポンプの動作状態・異音・漏れ



逆支弁の動作状態・漏れ

真空ポンプ



水漏れ・異常音の確認



真空到達度 -93.5 kPa

給水タンク



給水タンクの損傷・漏れ 清掃



下部給水弁の漏れ 清掃



蓋・取っ手の損傷・割れ



フロートスイッチの動作状態・汚れ

排水タンク



タンクの汚れ・漏れ 清掃



フロートスイッチの動作状態・汚れ

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030