

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者: 小野

点検年月日	平成26年12月1日	機種名	ONW-10B	製造機番	001462
設置場所				TEL	
設置時期	2008.6.16	使用時間	2686	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認	セーラー - 20℃ 18℃			
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.5 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素配管	正常	☒		
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐

交換部品		数量	コメント
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	エラー"11"発生セ-5-異常 (113班前) 20℃ 18℃ ※セ-5- 加圧交換 定期メンテナンス
セ-5- ASSY	交換 ☒	一個	
	交換 ☐		
	交換 ☐		

年 月 日
ご署名 

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

日付: 1426年 12月 / 日 作業者 小野

ONW-10 B 機番: 00142

客先: 三鷹 病院

様

定期交換部品		
排水シリコンチューブを交換したか		合/否
オゾン分解触媒を交換したか		合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか？確実に取り付いているか		合/否
酸素ガス配管確認		
ボンベレギュレーターの圧力計の指針は正常に動くか		合/否
ボンベレギュレータの二次側圧力は正常か(0.21~0.29Mpa)		合/否
酸素ボンベ~ONWまでの配管に漏れは無いか		合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min)	(0.78 L/min)	合/否
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか		合/否
フロントパネルのランプは配線したか		合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か		合/否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか		合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か		合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)		合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)		合/否
確認試験		
別紙 点検確認書に記録したか		合/否
オゾン水濃度の確認(0.3mg/L以上)		合/否
運転は正常か、エラーはでないか		合/否
インジケータの変色は良好か		合/否
運転プログラムのバージョン確認 (平成21年6月現在「11」が最新)		合/否

不具合内容・特記事項（否の場合、Noと共に理由を記入）

$7^a 7^{-7a} 9 \Rightarrow "11" 12 \text{ 变}$