

(館山市)鈴木内科クリニック 12/5訪問時異常データ

Date	Time	異常履歴	消去	Ct
09/05	11:14	停電	(E:403)	1
11/27	10:05	レベル異常	(E:214)	3
11/27	10:05	オーバーフロー異常	(E:205)	4
11/27	10:07	オーバーフロー異常	(E:205)	4
11/27	10:07	レベル異常	(E:214)	3
11/27	10:09	オーバーフロー異常	(E:205)	4
11/27	10:09	レベル異常	(E:214)	3
11/27	10:16	オーバーフロー異常	(E:205)	4

レベルセンサ異常(E:214) 戻る

○原因  
殺菌槽の水位を検知するセンサーが誤動作したため、自動停止しました。槽内の汚れ、異物などを検知した可能性があります。

○処置  
殺菌槽の清掃を行い、再度運転を行ってください。

↑異常後11/27以降 12/5までは12回以上正常に運転

装置情報 戻る

型式	OED-1000
製造番号	100116
プログラム	Ver. 0107/T01.A
納入年月日	10/09/24
前回定期交換日	14/09/09
交換後運転回数	131
運転回数(殺菌)	2016
運転回数(殺菌+アル)	1
運転回数(リークチェック)	0
運転回数(自己洗浄)	219
運転回数(アルコール単独)	0
運転回数(エア単独)	2

オーバーフロー異常(E:205) 戻る

○原因  
殺菌槽の水位が異常に高くなった場合に自動停止します。まれに水位センサーが内視鏡以外の異物を検出している場合もあります。

○処置  
水もれている場合は、至急点検を受けてください。水漏れがない場合は、槽内を清掃し、内視鏡以外は取り除いて運転してください。

↓スコープは若干白い

