

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 141216

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	ムラタ胃腸クリニック 様		機番	100107
環営	所在地	東京都武蔵野市吉祥寺南町 1-11-12 キャノンプラザ 6F		納入日	平成 22 年 5 月 10 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 26 年 12 月 3 日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 26 年 12 月 12 日
計	3				

修理依頼・不具合内容

各部点検・清掃（特にフタの部分）

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水槽およびフタの分解清掃を実施しました。
フタに付着した水滴がカバー下側の隙間に入らないように加工いたしました。

写真 1：フタ加工前



写真 2：フタ加工後



写真 3：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換（下表と写真 3 を参照ください）
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：出荷時の装置情報
交換後運転回数：859 殺菌：667、殺菌＋アルコール：5294、リークチェック：36
自己洗浄：1047、アルコール単独：216、エア単独：6

—以上—

承認



審査



作成

H26. 12. 16
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	フタパッキン	1 枚	
	水槽側パッキン	1 式	
	マニホールド周辺チューブ	1 式	
	脱気フィルタ	1 枚	
	アルコールタンクキャップ	1 個	
	水槽側コネクタ	2 個	

（株）IHI シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528