

## 点検確認書

株式会社 IHIシバウラ  
環境事業部

点検担当者： 菅田 和樹

|       |                |      |        |       |              |
|-------|----------------|------|--------|-------|--------------|
| 点検年月日 | 平成 26年 12月 17日 | 機種名  | ONW-10 | 製造機番  | 000257       |
| 設置場所  |                |      |        | TEL : | 028-615-1000 |
| 設置時期  | 平成 年 月 日       | 使用時間 |        | 御対応者  | 様            |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |                                            |                          |
|------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |                                            |                          |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/> |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/> |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/> |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/> |
| ランプ類       |      |                                     |                                            |                          |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/> |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                         | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄動作       |      |                                     |                                            |                          |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 性能確認       |      |                                     |                                            |                          |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度： 0.5 mg/L                               |                          |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                            |                          |
| 酸素発生       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度：93 % 流量：0.78 L/min 圧力：0.078 ~ 0.148 MPa |                          |
| 水漏れ確認      |      |                                     |                                            |                          |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 清掃         |      |                                     |                                            |                          |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                         | <input type="checkbox"/> |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                         | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                         | <input type="checkbox"/> |

| 交換部品     |                                        | 数量 | コメント |
|----------|----------------------------------------|----|------|
| 吸着筒      | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 |      |
| 吸湿筒      | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 |      |
| ドレン用フィルタ | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 |      |
| オゾン分解触媒  | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 |      |
|          |                                        |    |      |
|          |                                        |    |      |

2014 年 12月17日 東京都宮市江曾島3-785-4

あいざわ内科クリニック

ご署名 院長 相澤 俊幸

TEL:028-615-1000 FAX:028-615-1100



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ  
環境事業部

日付: 2014/12/17

作業者 菅田 和樹

ONW-10機番: 000257

PSA機番: SPS- 11656

客先: あいざわ内科クリニック 様

|                                          |  |     |
|------------------------------------------|--|-----|
| 定期交換部品                                   |  |     |
| 吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- 11179) |  | 合/否 |
| ドレン用フィルターを交換したか                          |  | 合/否 |
| 排水シリコンチューブを交換したか                         |  | 合/否 |
| オゾン分解触媒を交換したか                            |  | 合/否 |
| 配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと               |  | 合/否 |
| 取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか           |  | 合/否 |
| PSA性能確認                                  |  |     |
| 圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)          |  | 合/否 |
| 酸素濃度の確認 (運転開始から約3分後) (90%以上) ( 73 %)     |  | 合/否 |
| 酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min) ( 0.78 L/min)  |  | 合/否 |
| PSA圧力の確認 ( 0.078 Mpa) ~ ( 0.148 Mpa)     |  | 参考値 |
| 外装の取付                                    |  |     |
| オゾンセンサーは配線したか                            |  | 合/否 |
| フロントパネルのランプは配線したか                        |  | 合/否 |
| フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か                    |  | 合/否 |
| ドレンチューブは接続したか                            |  | 合/否 |
| 確認事項                                     |  |     |
| フタパッキンに剥がれはないか                           |  | 合/否 |
| 内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か                  |  | 合/否 |
| 洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか (汚れある場合清掃)        |  | 合/否 |
| 定期メンテナンスシールに点検日を記入したか                    |  | 合/否 |
| 定期点検カウンタをリセットしたか (フィルタリセットスイッチ20秒長押し)    |  | 合/否 |
| 別紙 点検確認書に記録したか                           |  | 合/否 |
| 確認試験                                     |  |     |
| オゾン水濃度の確認 (オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)         |  | 合/否 |
| 運転は正常か、エラーはでないか                          |  | 合/否 |
| インジケータの変色は良好か                            |  | 合/否 |
|                                          |  |     |
|                                          |  |     |
|                                          |  |     |
|                                          |  |     |

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)