

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S	製造番号:	300188
作業年月日	平成27年 1月 15日	作業時間:	2 Hr
顧客名	エー・エー・エー新聞橋クリーニング	TEL:	048-795-4760
所在地	エー・エー・エー市南区富前408-1	担当	中田 様
販売店		担当	様
納入年月日	平成2013年 11月 26日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期点検

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒
トレー	正常	☒
消毒槽コネクタ	正常	☒

0~1

清掃 ☐

消毒槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
消毒チューブ類	正常	☒

バルブ数 473

履歴 0.74 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありせん。フィルタ類は経過を確認済みです。

装置 情報	交換後運転回数:	1638	更新(リセット)実施・未実施	消毒:	3811	消毒+アル:	1138
	リークチェック:	0	自己洗浄:	312	アルコール単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	1
排水栓		☒	1	吸盤		☒	3
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

中田 美江子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者



西野