

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26 年 12 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	製造番号: 300268
作業年月日	平成 26 年 12 月 26 日	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	多摩 メディカル クリニック	TEL: 042-301-3001
所在地	東京都国分寺市 3-11-14 メディカルピア国分寺 2F	担当 渡辺 様
販売店		担当 様
納入年月日	平成 26 年 3 月 25 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

12/25 濃度制御注意 (E:109)

不具合原因、作業内容

・脱着フィルター
・保ち交換により不具合部品脱着フィルター 同時交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	消毒槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐ 未使用	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 462
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒チューブ類	正常 ☒
消毒槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

・異常ありません。

装置情報	交換後運転回数: 1356 → 0 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 1356	消毒+7A: 0
	リークチェック: ☒	自己洗浄: 2/6	7A単独: 0
			エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/			☐	
排水栓		☒	/			☐	
オゾン水濃度計		☒	/			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

126 年 12 月 26 日

ご署名 渡辺 修 印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 機械事業部
サービスグループ
東京都江東区東雲1-7-12 KDX 豊洲 グランスクエア 9 階
TEL: 03-5859-5012

責任技術者 作業者

