

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

02-29208

No. 110607

配 布 先		納 入 先	新鋭工業 株式会社 東京支店 殿			機 種	ONW-10
客先	1	所 在 地	埼玉県川口市芝中田2丁目48-6			機 番	000647
環営	1						
防品	1						
		ユ-ザ-名	益子病院 様			納 入 日	平成16年6月8日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	平成23年4月28日
計	3	返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	平成23年6月4日

修理依頼・苦情内容

総合点検依頼

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

オゾン発生器を含め、主要部品を交換しました。

運転カウンタ：12698

[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。

2. オゾン水濃度測定：0.44～0.56mg/L ・ 正常

3. PSA（酸素発生装置）性能点検 ・ 正常

酸素濃度：94.0% 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.091～0.158MPa（AC100V、50Hz）

4. 運転動作確認 ・ 正常

5. オゾンインジケータ変色 ・ 正常

—以上—

交換部品

承認	番号	部品名称	数量	備考
	1	オゾン分解触媒・ドレンフィルター	一式	
	2	吸着筒・吸湿筒	一式	
審査	3	PSA用コンプレッサ	一個	
	4	水ポンプ	一個	
	5	オゾン水系配管	一式	
作成	6	オゾンセンサー	一個	
	7	水位センサー（HH,H,L）	一式	
H23.6.7 中澤	8	フタスプリング	一式	
	9	オゾン発生器	一個	

写真1：オゾン分解触媒、PSA（酸素発生装置）部品



写真2：水ポンプ、オゾン水系統配部品



写真3：水位センサー、オゾンセンサー、オゾン発生器、フタスプリング

