

竹田 医院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 小野

点検年月日	平成 27 年 1 月 16 日	機種名	ONW-10	製造機番	001305
設置場所				TEL:	
設置時期	平成 19 年 5 月 2 日	運転回数	3193	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認	15-16時 14℃ 19℃					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.5 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度:	93.0 % 流量: 0.22 L/min 圧力: 0.076±0.14/MPa		
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☐	清掃	☒		
内部	正常	☐	清掃	☒		
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	
吸湿筒	交換 ☒	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	
オゾン分解触媒	交換 ☒	
	交換 ☐	
	交換 ☐	

ご署名 小野

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 1/27/1/1

作業者

ONW-10機番: 001305

PSA機番: SPS- 1168/

客先: 440 医院

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- 0098)	☒ 否	
ドレン用フィルターを交換したか	☒ 否	
排水シリコンチューブを交換したか	☒ 否	
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 否	
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 否	
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 否	
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (± 0.005 Mpa以内)	☒ 否	
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上)	(93.0 %)	☒ 否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min)	(0.77 L/min)	☒ 否
PSA圧力の確認 (0.076 Mpa) ~ (0.14 / Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	☒ 否	
フロントパネルのランプは配線したか	☒ 否	
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 否	
ドレンチューブは接続したか	☒ 否	
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	☒ 否	
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ 否	
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒ 否	
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 否	
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	☒ 否	
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 否	
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	☒ 否	
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 否	
インジケータの変色は良好か	☒ 否	
不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)		
1029-10-8-10 変更		