

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：

点検年月日	平成 27 年 / 月 28 日	機種名	ONW-10	製造機番	000894
設置場所				TEL:	
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常 ☒	交換 ☐		
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換 ☐		
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐		
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐		
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐		
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐		
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
給水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
アルコールフラッシュ	正常 ☐ 未使用	調整 ☐	交換 ☐	
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
排水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
異常音、振動	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度: 0.4 mg/L		
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素発生	正常 ☒	濃度: 91.2% 流量: 0.78 L/min 圧力: 0.083~0.147 MPa		
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
装置内	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
清掃				
外装	正常 ☒	清掃 ☐		
内部	正常 ☒	清掃 ☐		
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

2015 年 / 月 28 日

ご署名 桑原みち子



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシバウラ

環境事業部

日付: 2015年1月28日

作業者 尾住

ONW-10機番: 000894

PSA機番: SPS- 11659

客先: さくら記念病院

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-10834)	(合) / 否	
ドレン用フィルターを交換したか	(合) / 否	
排水シリコンチューブを交換したか	合 / (否)	
オゾン分解触媒を交換したか	(合) / 否	
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	(合) / 否	
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	(合) / 否	
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか ($\pm 0.005\text{Mpa}$ 以内)	(合) / 否	
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上)	(91.2 %)	(合) / 否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min)	(0.78 L/min)	(合) / 否
PSA圧力の確認	(0.083 Mpa) ~ (0.147 Mpa)	参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	(合) / 否	
フロントパネルのランプは配線したか	(合) / 否	
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	(合) / 否	
ドレンチューブは接続したか	(合) / 否	
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	(合) / 否	
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	(合) / 否	
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	(合) / 否	
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	(合) / 否	
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	(合) / 否	
別紙 点検確認書に記録したか	(合) / 否	
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	(合) / 否	
運転は正常か、エラーはでないか	(合) / 否	
インジケータの変色は良好か	(合) / 否	

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

酸素濃度上昇にやや時間かかる様子です。