

修理報告書（引き取り修理）

修理依頼
番号

No. 080403

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機 種	ONW-10
客先	1	所 在 地				機 番	000647
環営	1						
防品	1						
		ユ-ザ-名	益子病院 様			納 入 日	
		修 理 者	中澤一裕	作業時間	4 H r	出 荷 日	
計	3	返 送 先	納入先と同じ			発 送 日	2008 年 4 月 4 日

修理依頼・苦情内容

総合点検

不具合原因（故障箇所）と処置内容

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

点検時に判明した不具合との使用回数（8250）から以下の部品を交換しました。

- ・フタ開閉時の引っ掛かり、汚れ・・アッパーパネル、フタヒンジスプリング、タッチシート
- ・PSA（酸素発生装置）・・エアコンプレッサ及び新型PSA改修
- ・オゾン分解触媒
- ・マイナー部品・・排水シリコンチューブ、ネジ類など
- ・水ポンプ運転時のガラガラ音・・水ポンプ（P-1）

残り2台のポンプは次回点検時に交換をお勧めします。

[2] 修理・点検内容

1. 部品交換（別紙写真参照）

2. PSA性能確認・・正常 機番SPS1425

酸素濃度：92.4% 酸素流量：0.78L/min ガス圧力：0.086～0.155 Mpa（AC100V 50Hz）

3. 清掃作業

4. 運転確認・・正常

インジケータ変色・・異常なし

承認



審査



作成

H19.4.4

中澤

交換部品


部品番号	部品名称	数量	備考
762101771	アッパーパネル	4	
762872260	フタヒンジスプリング	1	
762901040	タッチシート	1	
762340471	エアコンプレッサ	1	ポンプ単体
762301130	マグネットポンプASSY	1	
	オゾン分解触媒	1	

交換部品写真

アッパーパネル、フタヒンジスプリング、タッチシート、水ポンプ



エアコンプレッサ、オゾン分解触媒

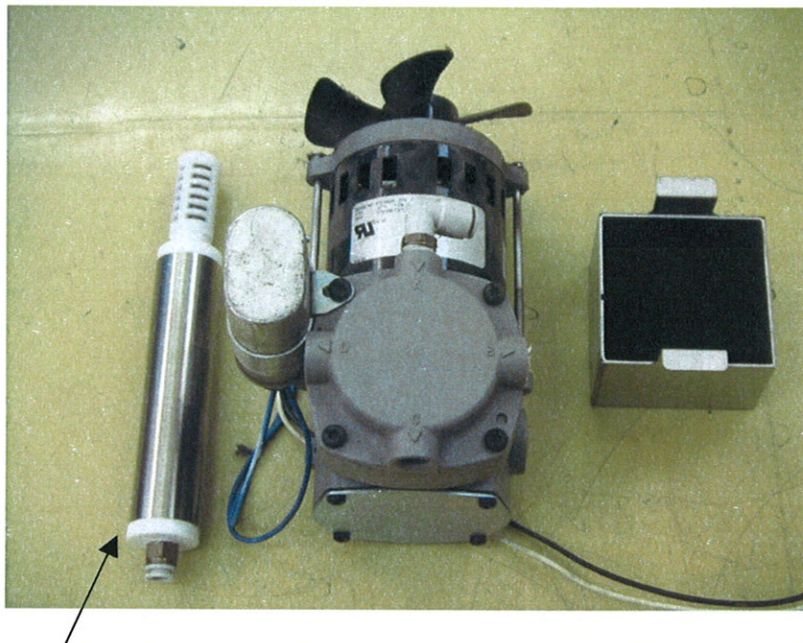

エアコンプレッサ用の入口サイレンサは今回の交換に伴い不要になりました。