

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年 1月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100123
作業年月日	平成27年 1月27日		作業時間:	Hr
顧客名	東京クリエック様		TEL:	027-221-7888
所在地	群馬県前橋市南町2-10-10		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成22年 9月28日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
・ タッチパネルの表示が正常に動作しない(黒の状態)	
不具合原因、作業内容	
・ タッチパネルの不具合(交換)	
・ 動作確認、殺菌+7h 1回 殺菌 1回 実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パネル数 24/
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
・ タッチパネルの動作確認は問題ありません。	

装置 情報	交換後運転回数: 280	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 2166	殺菌+7h: 2044
	リークチェック: 4/76	自己洗浄: 660	7h-1単独: 47	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		タッチパネル		☒	1
排水栓		☐				☐	
オゾン水濃度計		☐				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成27年 1月27日

ご署名 相京 亮

印

修理業者 株式会社 IHIシバウラ 機械事業部
サービスグループ
東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア9階
TEL: 03-5859-5012

責任技術者	作業者
	小野