

おとけし内科 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 小野

点検年月日	平成 27 年 2 月 24 日	機種名	ONW-10	製造機番	101729
設置場所				TEL:	
設置時期	平成 27 年 9 月 25 日	運転回数	547	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 24 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 92.4 % 流量: 0.28 L/min 圧力: 0.08/10.16 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☒
内部	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	1	定期点検部品交換 2 年目
吸湿筒	1	
ドレン用フィルタ	1	
オゾン分解触媒	1	

ご署名 本橋 茂 (印)

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 2022. 2. 24 作業者: 子野
ONW-10機番: 001723 PSA機番: SPS- 11614 客先: 八とけし内科 様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- 01748)	☒ 合	☐ 否
ドレン用フィルターを交換したか	☒ 合	☐ 否
排水シリコンチューブを交換したか	☒ 合	☐ 否
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 合	☐ 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 合	☐ 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 合	☐ 否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	☒ 合	☐ 否
酸素濃度の確認 (運転開始から約3分後) (90%以上)	(92.4 %)	☒ 合
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min)	(0.78 L/min)	☒ 合
PSA圧力の確認 (0.08 / Mpa) ~ (0.149 Mpa)		参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	☒ 合	☐ 否
フロントパネルのランプは配線したか	☒ 合	☐ 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 合	☐ 否
ドレンチューブは接続したか	☒ 合	☐ 否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	☒ 合	☐ 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ 合	☐ 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか (汚れある場合清掃)	☒ 合	☐ 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 合	☐ 否
定期点検カウンタをリセットしたか (フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	☒ 合	☐ 否
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 合	☐ 否
確認試験		
オゾン水濃度の確認 (オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	☒ 合	☐ 否
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 合	☐ 否
インジケータの変色は良好か	☒ 合	☐ 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

・プログラムのバージョン
・インジケータ 期限切れをミ使用。為 (奥に書いてある)
確認。為 持ち帰ると並へて、直る。を確認運転