

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 3 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号:	300148
作業年月日	平成 27 年 3 月 12 日 ~ 13		作業時間:	Hr
顧客名	さいたま新聞橋クリニック 様		TEL:	048-795-4760
所在地	埼玉県さいたま市西区宮前町 408-1		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
3/13 (金) 朝から2回目の運転 11:50「濃度制御注意 (E109)」発生 それ以降は7日運転して注意はもなかつた。			
不具合原因、作業内容 3/12 (木) 排水フィルタ交換 おまひ ホームセンター 設置調査 3/13 (金) 濃度制御注意対応。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッ数 366
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 6.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☐ 左上操作部亀裂	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
「濃度制御注意」は消毒は正常に終わっている。異常(画面がみ赤)は再度運転して下り 原因は「オゾンで消費する物が多く、濃度の上昇が遅かった」または「フィルタが詰まった」が考えられる。			

装置 情報	交換後運転回数: 879	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 4483	消毒+7L: 1341
	リークチェック: 4	自己洗浄: 364	7L単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
3/12 実施 排水フィルタ		☒	2	3/13 濃度計 フィルタ		☒	1
		☐		詰まりはありませんが		☐	
		☐		食の丸め交換しました。		☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		2015 年 3 月 13 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		ご署名 47, A 氏 氏 印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
H27.3.13 中沢	H27.3.13 中沢