

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 150316

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿		機種	OED-1000S
客先	顧客名	松本クリニック 様		機番	300421
環営	所在地	東京都品川区中延4丁目5番地10号		納入日	平成26年11月25日
環品	点検者	中澤 一裕	作業時間	受付日	平成27年3月9日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成27年3月13日
計	3				

不具合内容

3/8(日)に下記異常が発生した
 11時08、27分・水位低下異常(E:300)
 11時53分・・・消毒槽異常(E:101)
 11時57分・・・オゾンリーク異常(E:204)

3/9(月)2回とも正常に運転できた

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ①「水位低下異常」および「消毒槽異常」につきまして
 水槽の水位を検知するために、センサーが3箇所取り付けられています。
 消毒工程中に水位が規定より下がると「消毒槽異常」が発生し
 さらに水位が下がると「水位低下異常」が発生します。
- ② 3/13の点検結果と作業内容
 異常は再現しませんでした。念のために関係する部品を交換しました。

写真：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換(下表および写真をご参照ください)
- 2：運転プログラムバージョンアップ・・・Ver0205/T02C⇒Ver0207/T02C
 ※オゾン水濃度計の「ウォーミングアップ」が完了する時間について、条件によっては3分より短くなります。
- 3：性能確認・・・正常 オゾン水濃度：0.72ppm 濃度計パルス信号：672
- 4：運転確認・・・正常

一以上一

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水位レベルセンサー (LVH)	1 個	E300, E101 に関する部品
	オゾンガスセンサー	1 個	E204 に関する部品

(株) IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528

承認



審査



作成

H27. 3. 16
中澤